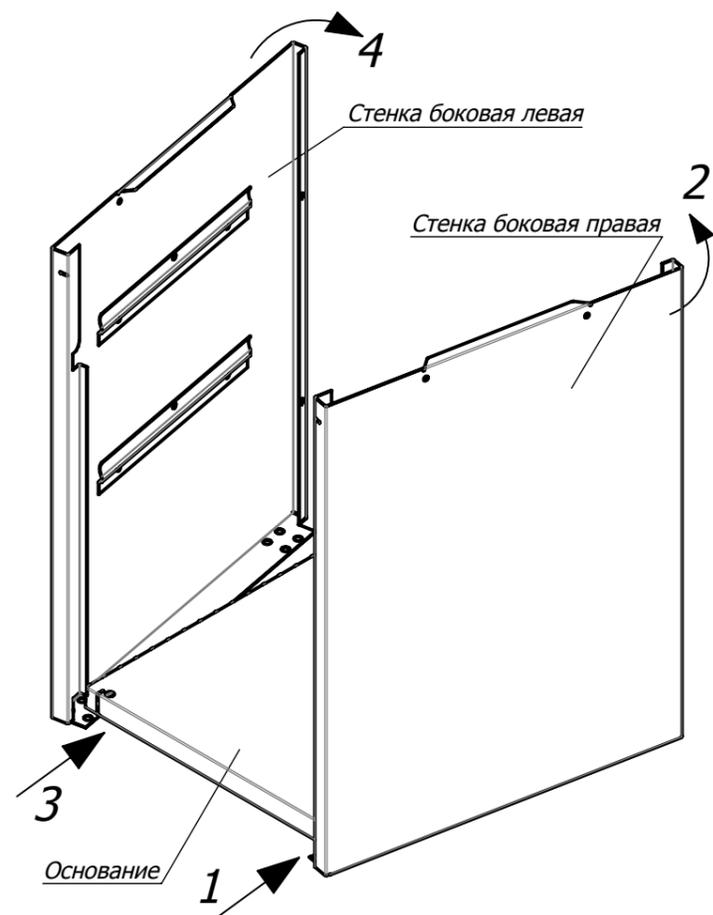
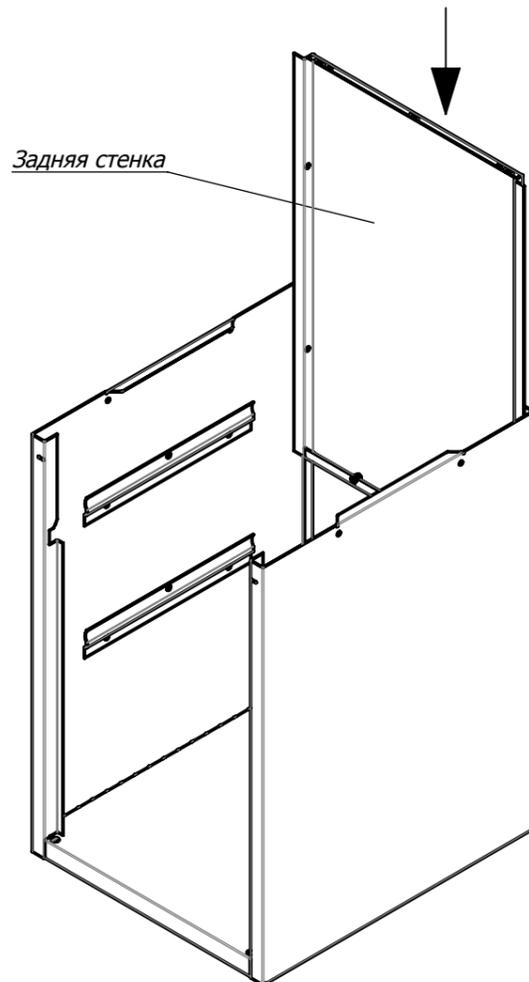
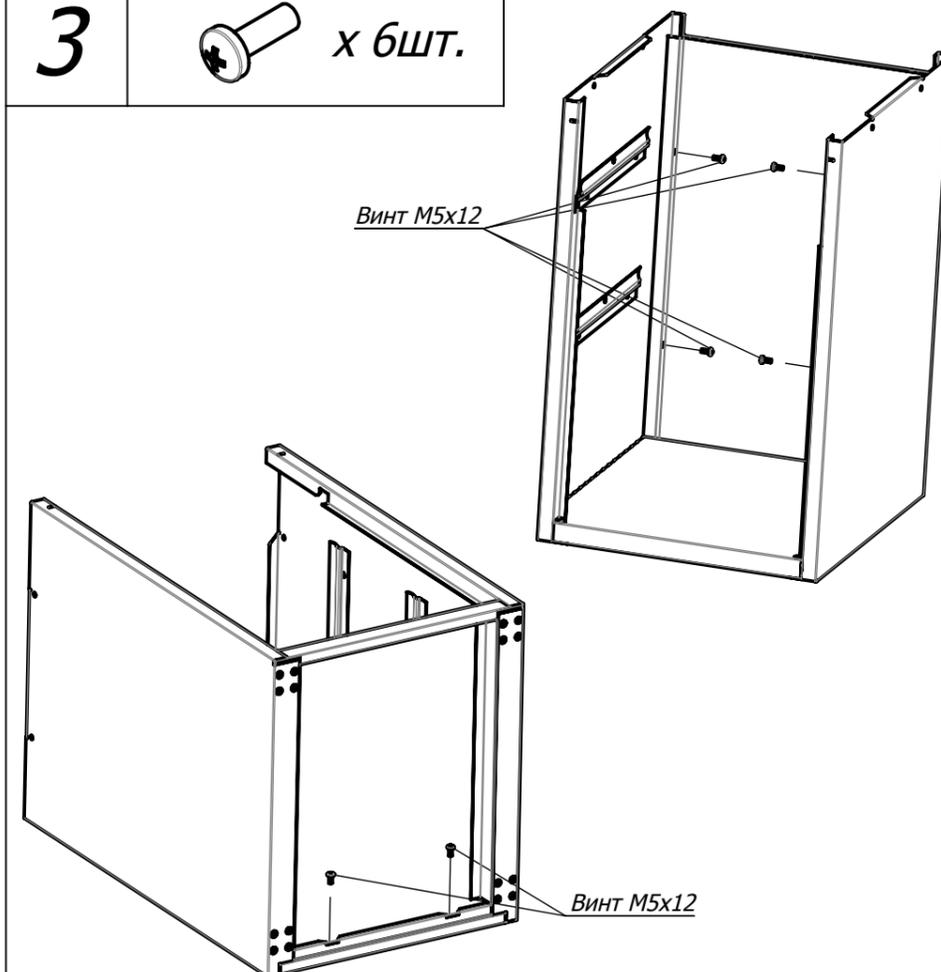
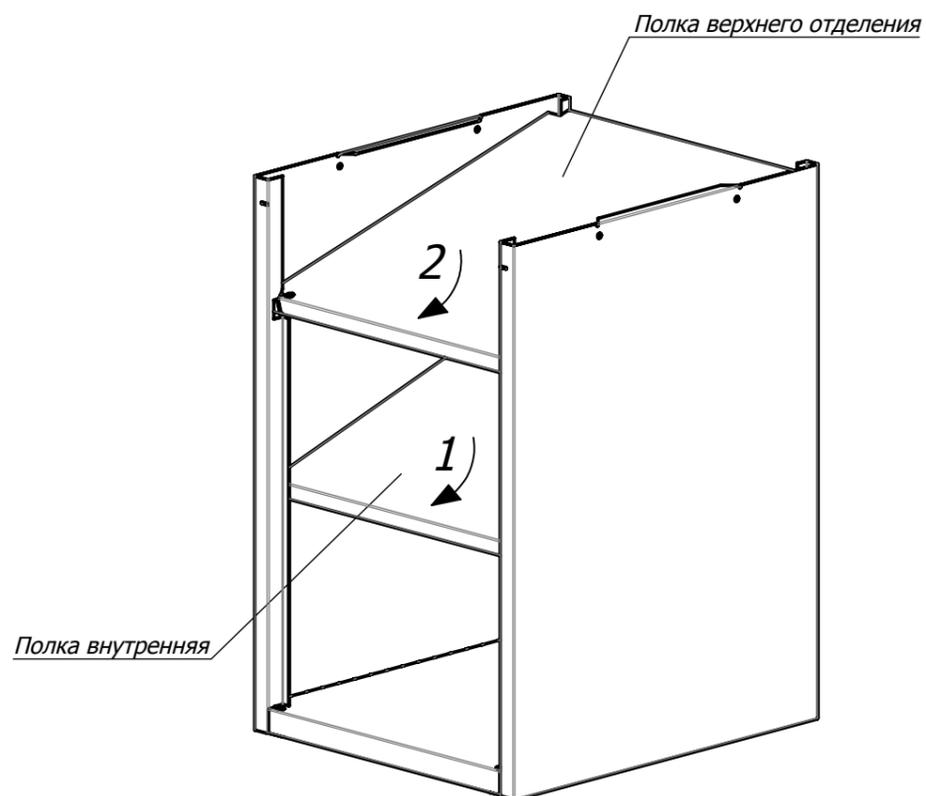



1**2****3**
 x 6 шт.
**4**

1. Установить полку в корпус, убедившись, что боковые гибы полки попали между боковой стенкой и ребром.
2. Установить полку верхнего отделения в корпус, убедившись, что боковые гибы полки попали между боковой стенкой и ребром.

**5**

Установку крыши производить в следующем порядке:


1. Завести переднюю часть выступами в овальные пазы на торцах боковых стенок.

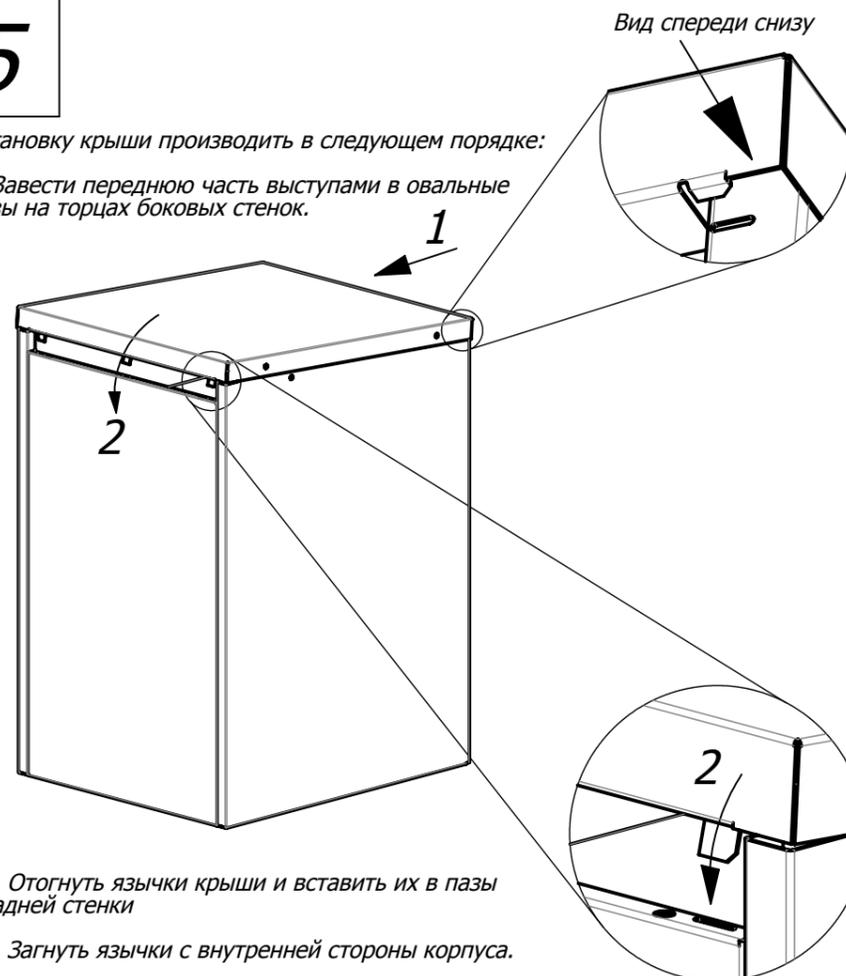

2. Отогнуть язычки крыши и вставить их в пазы задней стенки
3. Загнуть язычки с внутренней стороны корпуса.


6
 x 16 шт.  x 2 шт.

Ролики со стопором необходимо разместить с лицевой стороны тумбы.

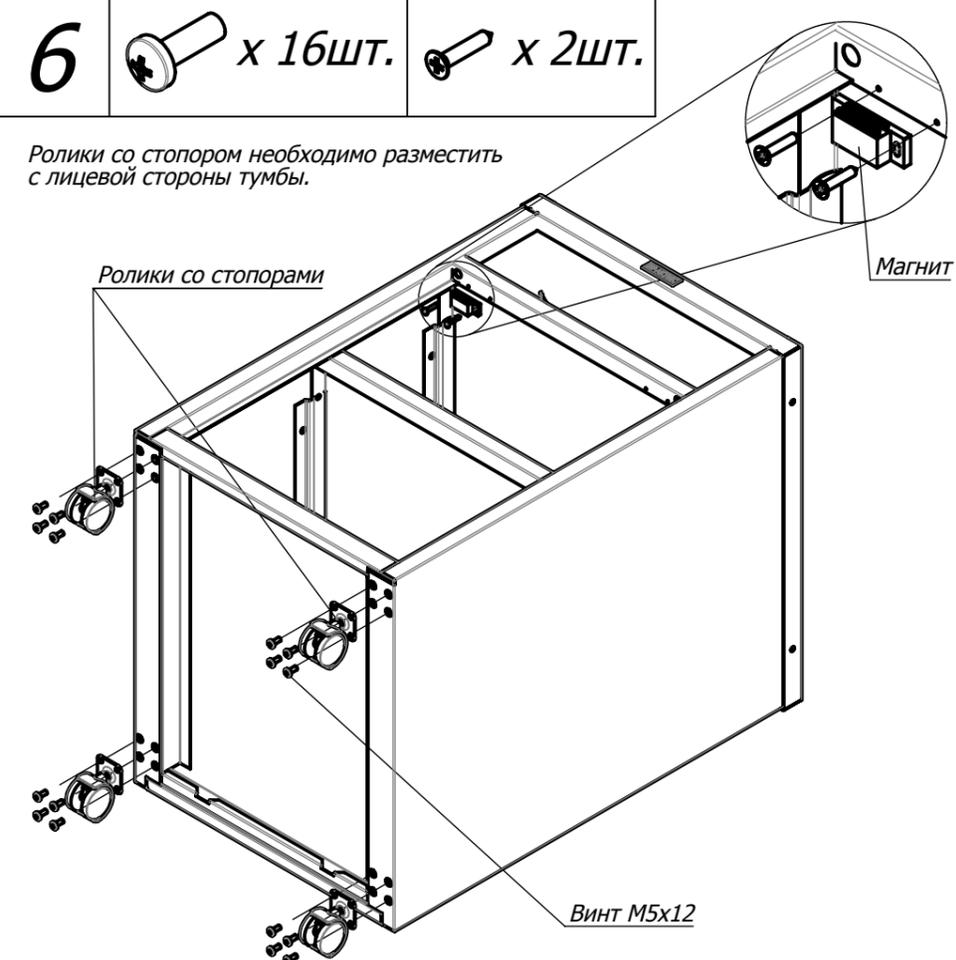


7

1. Вставить оси в отверстия как показано на рисунке. Ось подпружиненная устанавливается в нижнее отверстие.
2. Одеть дверцу на оси. при необходимости (ось не входит в отверстие двери) очистить отверстие от излишков краски.
3. Загнуть язычок на двери, расположенный напротив магнита.
4. Установить ручку на винты М4х5 с полукруглой головкой. С винтами использовать шайбы М5

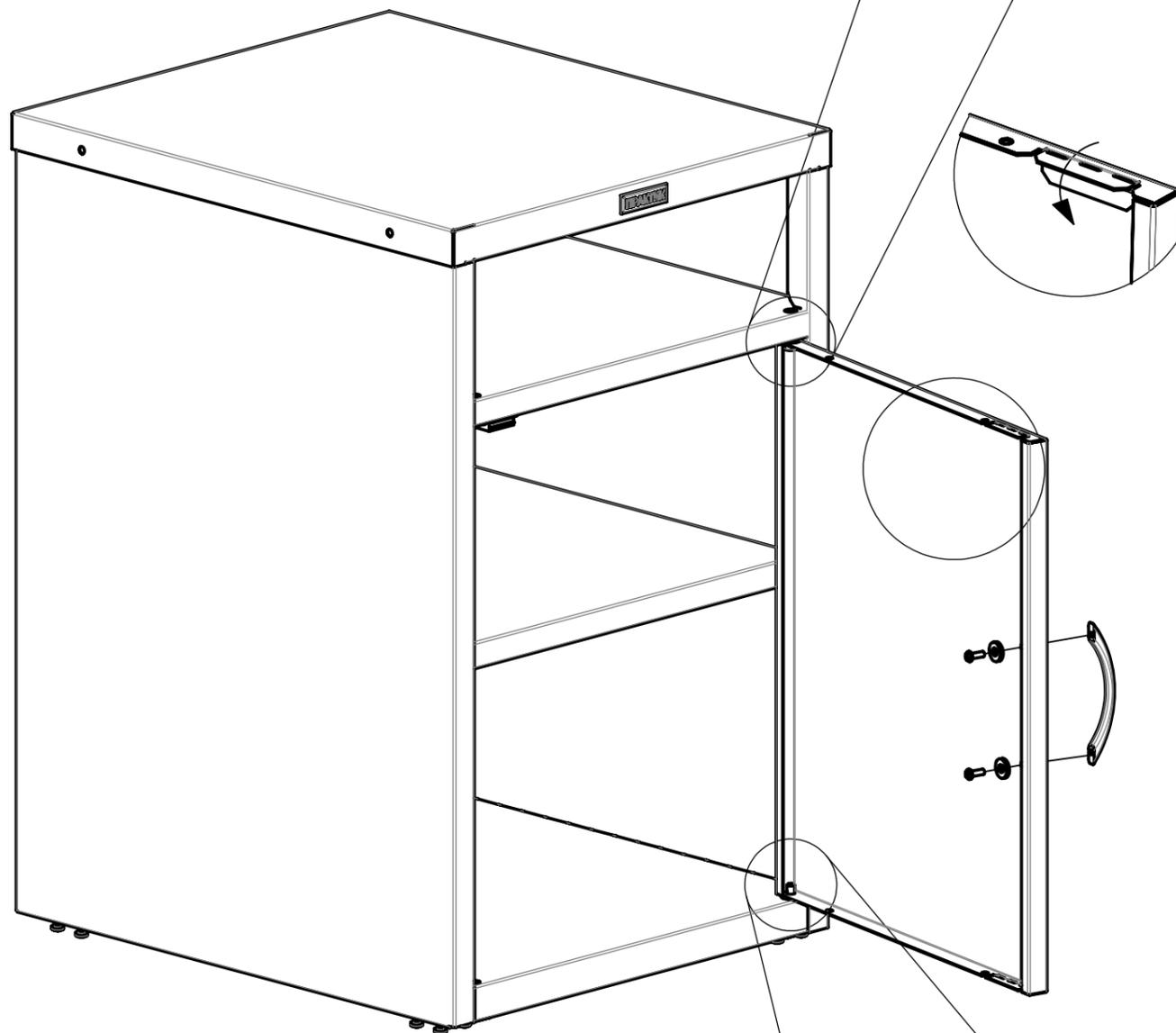


Пояснения к инструкции

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в верхнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий (если они требуются) для сборочной операции указано рядом с порядковым номером сборочной операции.

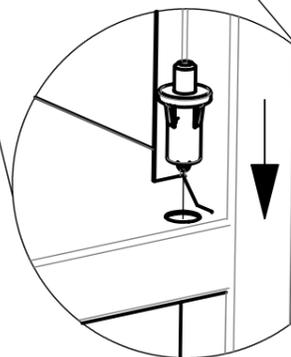

Тумба медицинская прикроватная

ТП-3

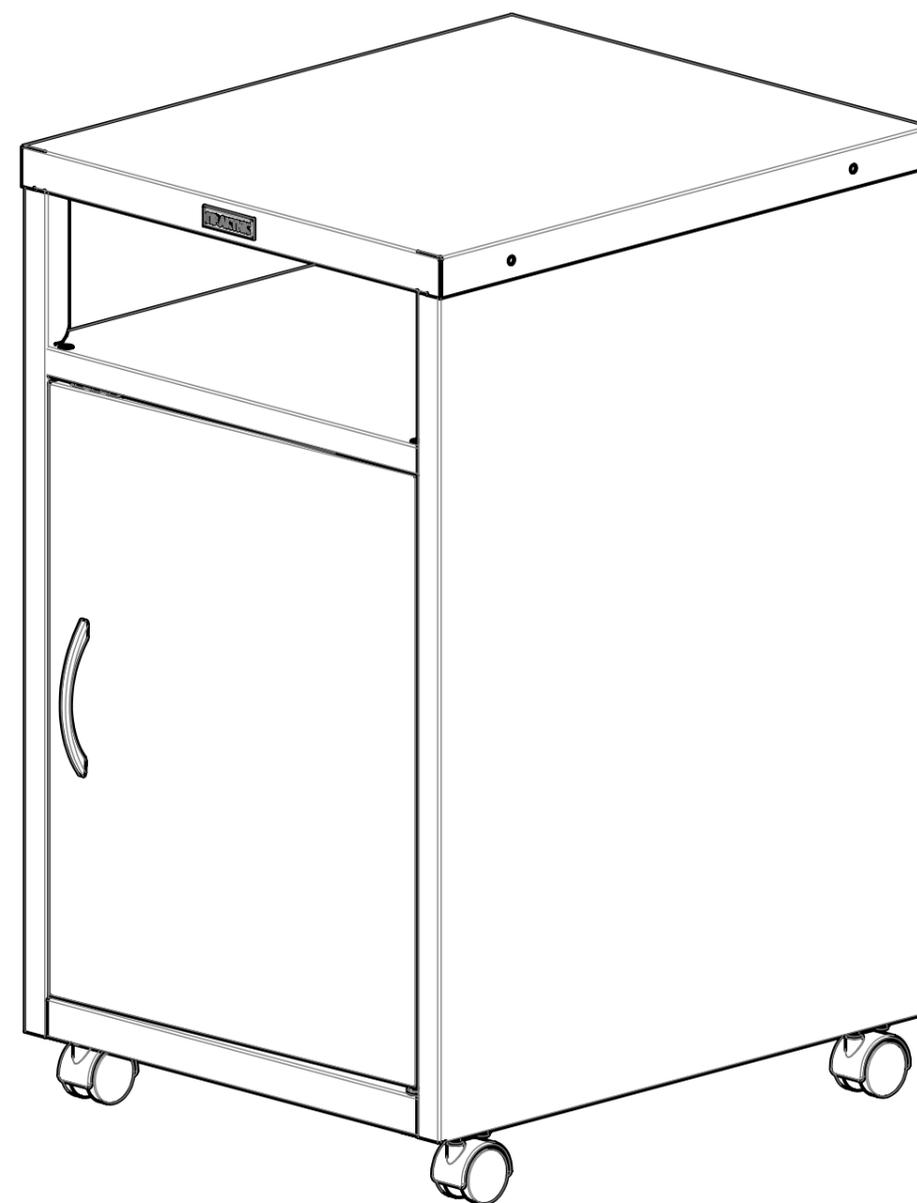

Инструкция по сборке